



Ultraschallreinigung  
nach neuesten Gesetzen.

# Elmasonic Med\*



**Elmasonic Med ist die Serie leistungsstarker Ultraschallreinigungsgeräte, die für zuverlässige Vorreinigung medizinischer, zahnärztlicher und chirurgischer Instrumente und Implantate steht. Mit 37 kHz Ultraschallfrequenz lassen sich auch hartnäckigste Verschmutzungen entfernen.\*\***

**Passend zu den verschiedenen Anwendungen gibt es Elmasonic Med Reinigungsgeräte mit Wannenvolumen von 3 bis 90 Liter (ab Med 60 mit Ablauf). Für beste Reinigungsergebnisse sorgt die von Elma entwickelte, anwendungsspezifische Reinigungschemie und praktisches Zubehör wie Körbe, Trayhalter, uvm.**

**\*\*Elmasonic Med ersetzt grundsätzlich NICHT die Aufbereitung im RDG.**

### Entwickelt für

Arztpraxen • Krankenhäuser • Zahnarztpraxen  
• Zentrale Sterilgutversorgungsabteilungen •  
Dentallabore • Tattoo- und Piercingstudios •  
Fußpflegesalons



### Reinigt

Chirurgische, medizinische oder zahnärztliche  
Instrumente • Prothesen und Implantate •  
Instrumentarium aus den Bereichen Podolo-  
gie, Tattooing und Piercing



### Entfernt

Blut, Gewebe- und Knochenrückstände •  
Fette • Sekrete • Dentinspäne • Zahnstein •  
basale Ablagerungen • Alginate, Gipse •  
Schleif- und Polierpasten • Wachse •  
Flussmittel • Zement • Horn- und Hautreste •  
sonstige Verunreinigungen



## Clean



### MDR-Konform

Elmasonic Med Geräte sind nach MDR-Verordnung (EU) 2017/745 als Medizinprodukt der Klasse I registriert.



### Cleanes Design

Edelstahloberflächen sind leicht zu reinigen, Display und Folientastatur sind abwischbar. Das moderne Design kann sich sehen lassen.

## Intelligent



### 5 individuelle Ultraschallmodi

degas: Schnellentgasung  
eco: Leise, energieeffizient, längere Gerätelebensdauer  
sweep: Gleichmäßigere Ultraschallreinigung  
pulse: Bei hartnäckigsten Verschmutzungen  
dynamic: Automatischer Wechsel zwischen pulse und sweep für noch bessere Reinigungsergebnisse



### Eigene Programme speichern

Vier individuelle Reinigungsprogramme lassen sich im Menü speichern und per Schnellwahl aktivieren – für verlässliche Abläufe und reproduzierbare Reinigungsergebnisse.

## Einfach



### Intuitiv und Anwenderorientiert

Das gut lesbare und übersichtliche Display erlaubt eine einfache und präzise Einstellung der Reinigungsparameter.



### Feedback vom Gerät

Dank Anzeigen und Warnmeldungen, z. B. bei Reinigungsende oder bei Erreichen der Grenztemperatur, wird der Anwender stets über den aktuellen Betriebszustand informiert.

## Sicher



### Smarte Technik

Die Grenztemperatur ist individuell einstellbar. So kann die Denaturierung von Protein verhindert werden. Wertvolles Instrumentarium wird geschützt und perfekt sauber.



### Schutz für Anwender

Der Kunststoffdeckel sorgt durch reduzierte Betriebsgeräusche für eine leisere Arbeitsumgebung. Nach der Reinigung dient er als praktisches Abtropftablett für Korb und Teile.



**Elma Schmidbauer GmbH**  
**Gottlieb-Daimler-Str. 17**  
**78224 Singen (Germany)**  
**[www.elma-ultrasonic.com](http://www.elma-ultrasonic.com)**

Technische und optische Änderungen vorbehalten.  
Elmasonic Med\_DE\_07\_20

\*Medizinprodukt Klasse I gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745. Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze.